



Adel
agrégateur de données en ligne

Notice d'utilisation de la plateforme Adel

Sommaire

Interface générale

1. Accueil 4
2. Listes 5
3. Tableau de bord 6

Patients & appareils

1. Création d'un appareil 6
2. Création/modification d'un patient 8
3. Affectation d'un appareil 10
4. Désaffectation d'un appareil 11
5. Données et rapports PDF 12
6. Gestion des alertes 14

Manager

1. Gestion des comptes 16
2. Création d'un appareil 17

Interface générale

1. Accueil

L'accueil réunit 4 blocs permettant une vision globale du «compte» ainsi que des accès rapides à l'ensemble des fonctionnalités d'Adel.

1. Le bouton Déconnexion
2. Le menu principal
3. Le bloc Alertes importantes
4. Le bloc Statistiques
5. Le bloc Accès Rapide

The screenshot displays the main dashboard of the Adel software. At the top, there is a header bar with the text 'ADEL // ESPACE PRESTATAIRE' on the left and 'Bienvenue, AgenceDém0' on the right, along with a user profile icon and a power button icon (callout 1). Below the header is a navigation menu with icons for 'Accueil' (callout 2), 'Tableaux de bord', 'Appareils', 'Patients', 'Alertes' (with a red notification badge showing '13'), and 'Coordination'. The main content area is divided into several sections:

- STATISTIQUES**: A section titled 'PATIENTS RÉFÉRENCÉS' (callout 4) showing a large blue box with the number '15'.
- ACCÈS RAPIDE** (callout 5): A vertical sidebar with four buttons: 'Ajouter appareil' (pink), 'Ajouter patient' (blue), 'Ajouter personnel' (yellow), and 'Ajouter gabarit' (red).
- ALERTES RÉCENTES** (callout 3): A red header section containing a table of recent alerts.

Date ▲▼	Modèle	Patient ▲▼	Référent ▲▼	Médecin ▲▼
03/02/2016	Données manquantes (jours consécutifs)	+	ESCOLAR Fabien	MEDEMO Test 🔍
30/01/2016	IAH moyen élevé	+	ESCOLAR Fabien	MEDEMO Test 🔍
28/01/2016	Fuites quotidiennes élevées (jours consécutifs, période d'utilisation)	+	ESCOLAR Fabien	MEDEMO Test 🔍
11/06/2015	Données manquantes (jours consécutifs)	+	TOTO Api1	MEDEMO Test 🔍

At the bottom right of the alert table, there is a link: [Voir les 13 nouvelles alertes](#).

The footer of the page contains the text 'ADEL // Espace prestataire - Copyright © Data Med Care' and the 'DATA MED CARE' logo, which consists of two overlapping orange circles.

2. Listes

Le compte technicien permet de gérer l'ensemble des éléments nécessaires au suivi de l'observance des patients, à savoir : les **appareils**, les **patients** et les **alertes**. Pour chacun de ces éléments, vous disposez :

1. Du bloc inventaire, vision générale des éléments et de leur répartition
2. Du bloc Recherche, permettant une sélection particulière
3. Du bouton d'ajout d'élément
4. Du bloc filtres, affinant la recherche
5. De la liste des éléments
6. Du bouton «loupe» pour consulter la fiche de l'élément
7. De pagination

RECHERCHER UN APPAREIL

RECHERCHER

8 APPAREILS

- En stock 4
- Installé 4
- Indisponible 0
- Rebut 0

AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL

FILTRES

<Etat> <Type app.> <Fabricant> <Modèle app.> 4 filtres

Etat	Type	Fabricant	Modèle	N° série	N° interne	Depuis le		
Installé	Capteur observ.	Geri Communication	Boîtier TSI	TSE1_TEST0005	TSE1_TEST0005	26/09/2013	-	🔍
Installé	Capteur observ.	SRETT	Boîtier T4P	27252	Srett_Test_1	25/09/2013	-	🔍
En stock	Capteur observ.	SRETT	Boîtier T4P	130921		26/09/2013	-	🔍
Installé	PPC	Breas	iSleep 20	E020241		24/05/2013	-	🔍
En stock	PPC	Breas	iSleep 20	PPC_Test_1	PPC_Test_1	25/09/2013	-	🔍
En stock	PPC	Philips	PR1	PPC_Test_2	PPC_Test_2	30/07/2012	-	🔍
Installé	PPC	ResMed	S9	20121781367	20121781367	27/05/2013	-	🔍
En stock	PPC	ResMed	S9	PPC_Test_3	PPC_Test_3	07/12/2011	-	🔍

Affichage de 1 à 8 résultats sur 8 résultats

« ‹ 1 › »

3. Tableau de bord

Suivi des patients nouvellement appareillés jusqu'à 150 jours (Primo installation)

1 **TABEAU ABSOLU** **TABEAU RELATIF** 2

TABEAU DE SUIVI DES APPAREILLAGES EN SAOS

FILTRES

<Prescripteur> <Réfèrent> RECHERCHER EXPORT XLS EXPORT PDF

Patient	Prescripteur	3 j	7 j	14 j	30 j	60 j	90 j	120 j	Commentaires
		00:00	00:00	00:00	03:57	05:19	06:35	06:53	
		00:00	00:10	00:05	01:08	00:35	00:23	00:17	
		08:55	08:45	08:23	06:40	-	-	-	
		06:14	06:10	04:43	04:39	05:24	05:08	03:51	
		03:21	01:44	01:21	00:49	00:28	00:18	00:14	
		00:00	02:25	04:08	05:14	06:11	06:11	06:26	
		00:00	03:24	05:04	06:05	06:28	06:14	06:18	
		00:00	00:00	00:00	00:00	00:41	03:04	02:53	
		04:46	04:31	03:27	01:53	-	-	-	
		06:55	06:46	06:53	06:41	06:38	06:34	06:19	

Affichage de 171 à 180 résultats sur 2 407 résultats

« « 16 17 18 19 20 » »

2 types :

1. Période absolue -> Date d'installation à N jours de i à n1, de i à n2...
2. Période Relative -> entre deux dates de i à n1, de n1 à n2,...

Patients & appareils

1. Création d'un appareil

Seul le manager possède le droit de créer un appareil, qui peut ensuite être affecté à un patient.

Aller dans le menu «Appareil», puis cliquer sur le bouton «Ajouter un nouvel appareil»

Sélectionner le modèle de l'appareil et renseigner le numéro de série. Sauvegarder la création en cliquant sur le bouton «Enregistrer»

 AJOUT D'UN NOUVEL APPAREIL


Modèle	<sélectionner>	Type	
N° série		Fabricant	
N° interne		Créé le	07/10/2013
Etat	En stock		

 Attention l'appareil doit être déclaré sur la plateforme du fabricant

2. Création/Modification d'un patient

Pour ajouter un patient :

- Accueil ▶ bloc «Accès rapide» ▶ «Ajouter Patient»
- Liste des patients ▶ «Ajouter Patient»

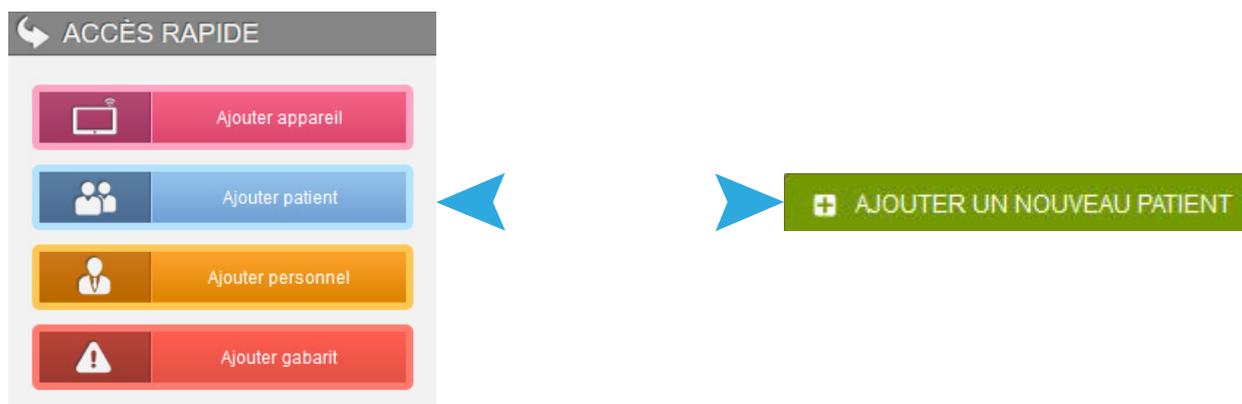

Ensuite remplir les champs de la fiche patient vierge,

! Ne pas oublier d'enregistrer à la fin de la saisie.

Ce patient s'affiche dans la liste des patients.

🏠 FICHE DU PATIENT

Nom	<input type="text"/>	Etat patient	Actif <input type="button" value="v"/>	
Prénom usuel	<input type="text"/>	Créé le	27/01/2016	
Prénoms carte vitale	<input type="text"/>	Date de naissance	31/01/2016	
NIR / N°SS	<input type="text"/>	Sexe	<input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> H	
Identifiant Santé / INS	<input type="text"/>			
Organisme sécu.	<input type="text"/>			
Projet Pascaline	<input type="checkbox"/>	Cocher cette case pour marquer ce patient participant au projet "Pascaline".		
Clé Som'Respir	<input type="text" value="iJ92i9kEtSRi5DYSGN0Fvw2"/>			

Clé à fournir au patient qui souhaite consulter ses données de télé-suivi sur la plateforme Som'Respir de la FFAAIR. [📄 Télécharger les instructions](#)

COORDONNÉES

Pour consulter la fiche d'un patient ou d'un appareil, cliquer sur l'icone «Loupe» située à droite de la ligne du patient ou de l'appareil concerné.

75524			26/10/2015	Gamme S10 (PPC)	07:20	
75356			13/01/2016	Gamme S10 (PPC)	02:35	
75526			12/02/2016	Gamme S10 (PPC)	01:25	
75535			10/07/2015	Gamme S10 (PPC)	00:00	
75536			17/07/2015	Gamme S10 (PPC)	02:26	
75531			16/07/2015	Gamme S10 (PPC)	02:26	

Certain champs sont munis d'un icone symbolisant la liaison et permettant d'ouvrir :

- L'appareil lié dans le cas d'un patient
- Le patient lié dans le cas d'un appareil

APPAREIL INSTALLÉ

Appareil	S9 Autoset 23121028703, ResMed
Installé le	27/05/2013
N° modem fabricant	

4. Affectation d'un appareil

Une fois le patient créé, il est possible de lui affecter un appareil. Aller dans le cadre «Pathologie» et cliquer sur le bouton «**Installer un appareil**»

 TRAITEMENT POUR APNÉES DU SOMMEIL

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Prescripteur <input style="width: 80%;" type="text"/> </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Adresse <input style="width: 95%;" type="text"/></p> </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Appareillage le <input type="text" value="16/02/2016"/></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Télesuivi le <input type="text" value="16/02/2016"/></p> </div> </div>
<p>Etat traitement <input type="text" value="En cours"/></p>
<p>Personnel référant <input type="text" value="<aucun>"/></p>

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

<p>Mode <input type="radio"/> Fixe <input type="radio"/> Autopilotée</p>	<p>Humidificateur <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p>
<p>Pression min <input type="text"/></p>	<p>Type masque <input type="text" value="<Sélectionner>"/></p>
<p>Pression max <input type="text"/></p>	<p>Modèle masque <input type="text"/></p>

SUPPRIMER CE TRAITEMENT

INSTALLER UN APPAREIL

 Le panneau «Nouvelle installation» s'ouvre. Sélectionner un appareil en cliquant sur la puce située à droite de la ligne . Valider votre choix.

L'appareil doit être préalablement créé par le Manager, seul compte abilité à utiliser cette fonctionnalité.

RECHERCHER UN APPAREIL

N° série
 N° interne
 Référence

RECHERCHER

FILTRES

EFFACER FILTRES

Etat	Type	Fabricant	Modèle	N° série	N° interne	Depuis le	
	Capteur observ.	SRETT	Boîtier T4P	_Test_		26/09/2013	<input type="radio"/>
	PPC	Breas	iSleep 20	PPC_Test_1	PPC_Test_	25/09/2013	<input type="radio"/>

3



5. Désaffectation d'un appareil

Pour désaffecter un appareil, retourner sur la fiche du patient concerné, aller dans le cadre «**Pathologie**» et dans la partie «**Appareil installé**» cliquer sur le bouton orange «Désaffecter l'appareil»

L'appareil est à nouveau disponible dans liste des **appareils en stock**, et il peut être alors affecté à un autre patient.

APPAREIL INSTALLÉ

Appareil	S9 Autoset 23121028703, ResMed		DÉSAFFECTER L'APPAREIL
Installé le	27/05/2013		
N° modem fabricant		Etat de la paire	

Observance quotidienne à 14 jours

Information pratique


Le picto signifie que cet appareil est installé chez un patient

	Capteur observ.	Geri Communication	Boîtier TSI	TSE1_TEST0005	TSE1_TEST0005	26/09/2013	-	
	Capteur observ.	SRETT	Boîtier T4P	_Test_		26/09/2013	-	
	Capteur observ.	SRETT	Boîtier T4P	6015649	Srett_Test_1	25/09/2013	-	

Le picto signifie que ce patient possède un appareil

3	TEST3	Prenom3	xxx	MEDDEMO Test	Agence Démo			
4	TEST4	Prenom4	xxx	MEDDEMO Test	Agence Démo			
5	MERCIER	Silvere		MEDDEMO Test	Agence Démo			

6. Données et rapports PDF

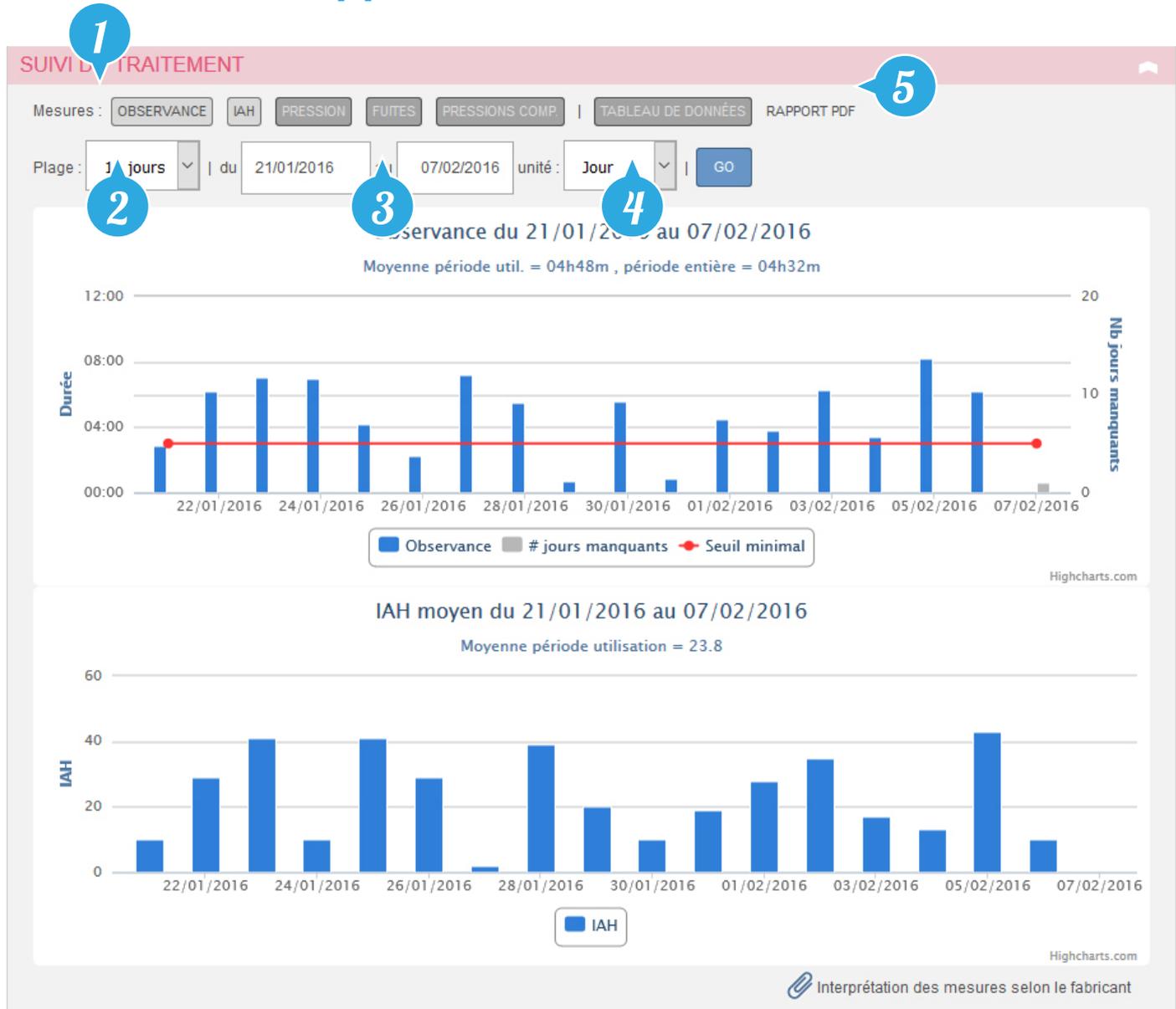

1. Sélection des données à afficher : observance, IAH, pression, fuites, pression complémentaire, tableau des données
2. Présélection d'une période d'affichage des données
3. Sélection d'une plage de dates d'affichage des données
4. Choix de l'unité temporelle
5. Génération du rapport PDF en fonction de la plage ou des périodes de temps sélectionnées

Rapport de l'utilisation d'appareil à PPC

Au 16/02/2016

MERCIER Teddy

11 rue de la lune
 Adresse 2
 Adresse 3
 75012 Paris

Agence **AgenceDém**
 Prescripteur **MEDEMO Test**

Appareillé(e) le : 01/12/2014

Télesuivi(e) depuis le : 01/12/2014

Pour la période du 21/01/2016 au 07/02/2016



Informations complémentaires

- **Dispositif médical** : REMstar Auto, Philips, depuis le 16/09/2015
- **Type de masque** : Facial
- **Modèle de masque** : EasyLife avec dispositif fuite (Philips)
- **Mode** : Fixe
- **Pression** : 9
- **Humidificateur** : Oui

Interprétation des mesures selon le fabricant

	ResMed	Philips	Fisher & P.	SRETT	NowApi
Pression	95 cent.	90 cent.	90 cent.	90 cent.	Moyenne
Fuites	95 cent.	90 cent.	90 cent.	90 cent. ¹	Moyenne

¹ Fuites totales

Tableau des débits/pression (indicatif)

Pression	6	8	10	12	14	16	18	20	cmH ₂ O
Fuites intentionnelles	≈ 26	≈ 32	≈ 35	≈ 38	≈ 41	≈ 44	≈ 47	≈ 50	l.m ⁻¹
Fuites non intent.				0 à 24					l.m ⁻¹
Fuites totales (max)	50	56	59	62	65	68	71	74	l.m ⁻¹

6. Gestion des alertes

- Modèles : type d'alerte souhaité => 14 modèles prédéfinis
 - Gabarits : Personnalisation d'un modèle prédéfini en renseignant toutes des variables qui le compose (Ex : IAH moyen élevé, 2 critères : seuil, Nb de jours).
 - Portée : Agence < Prescripteur < Patient (Ordre +++)
-
- Notion de période entière et période d'utilisation pour l'observance
 - Alerte non archivée pour un patient donné ne générera pas une nouvelle alerte pour le même modèle
 - Une alerte en jours n consécutif archivée à la date t n'est pas ré-évaluée avant la date t+n.

ALERTE TECHNIQUE

Nouvelle depuis le	04/10/2013		
1 Type	Technique		
Description		Info. complémentaires	
Aucune donnée d'appareil communiquant n'a été reçue depuis 4 jours		Patient au moment du déclenchement : TEST2 Prenom2 Dernière mesure reçue le : 2013-08-26	
2 Appareil	PPC REMstar Auto	3 Patient	TEST2 Prenom2
4 Etat	<input type="radio"/> Non lue <input checked="" type="radio"/> En cours <input type="radio"/> Archivée	5 Résolution	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Sans objet
Commentaires			

1. Type d'alerte : Technique, médicale, réglementaire ou administrative
2. Appareil : Appareil lié à cette alerte
3. Patient : Patient lié à cette alerte
4. État de l'alerte : Permet un changement d'état de cette alerte
5. Résolution : Permet de marquer la résolution de l'alerte.

Niveaux d'alerte

Les alertes sont catégorisées en **3 niveaux de gravité** :

 Alertes Critiques  Alertes Modérées  Alertes Faibles

Bulles d'alertes

Les alertes non-lues sont toujours affichées dans une bulle du menu principal.



Manager

Le compte manager possède des fonctionnalités supplémentaires par rapport au compte technicien (voir chapitre «interface générale»)

1. Gestion des comptes

Création d'un compte technicien

Aller dans le menu «Coordination» , puis cliquer sur le bouton «Ajouter utilisateur»

Les informations obligatoires sont le nom et le prénom afin de valider la création du technicien.

 FICHE DE PERSONNEL

Prestataire	Prestataire Démo ▼	Agence	AgenceDémo ▼
Nom	<input type="text"/>	Créé le	
Prénom	<input type="text"/>	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>

Toutefois, **il est obligatoire de lui associer un compte utilisateur**, afin que celui-ci puisse se connecter à la plateforme. Pour ce faire, cocher la case «Associer un compte utilisateur»

 COMPTE UTILISATEUR ASSOCIÉ

Associer un compte utilisateur

Les informations obligatoires sont le «Nouveau Login», le mot de passe et sa confirmation. Cliquer sur «Enregistrer» pour créer l'association entre le technicien et le compte.

Modification de mot de passe

Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur, sélectionner l'utilisateur dans la liste, puis attribuer un nouveau mot de passe comme lors de la création.

2. Création d'un appareil

Seul le manager possède le droit de créer un appareil, qui peut ensuite être affecté à un patient.

Aller dans le menu «Appareil», puis cliquer sur le bouton «Ajouter un nouvel appareil»

Sélectionner le modèle de l'appareil et renseigner le numéro de série. Sauvegarder la création en cliquant sur le bouton «Enregistrer»

+
AJOUT D'UN NOUVEL APPAREIL

Modèle	<input type="text" value="<sélectionner>"/>	Type	<input type="text"/>
N° série	<input type="text"/>	Fabricant	<input type="text"/>
N° interne	<input type="text"/>	Créé le	07/10/2013
Etat	<input type="text" value="En stock"/>		

 Attention l'appareil doit être déclaré sur la plateforme du fabricant

